



ZOPEC EXPLORE™ MINI

QUICK START GUIDE

Thank you for trusting us with your therapy.
Our battery has you covered!

IMPORTANT!

1. Before First Use - Charge Zopec Battery fully.
 2. Fully Charge Before Storage and EVERY 6 MONTHS. Failing will void the warranty!
-

SCAN HERE
TO GET STARTED!



USING YOUR
SMART PHONE
CAMERA

Quick Tips:

Turn on the battery: Press and hold the power button for 2 seconds until LED lights turn on. **Charging your Explore Mini:** Use your own USB-C plug or CPAP power adapter to charge.

Power up your Electronics: Depending on the device, plug a USB or USB-C cable into the appropriate port and charge. If using a CPAP machine, select the DC cable for your device and connect it to the DC output on the battery.

You can now sleep safe & uninterrupted.

For any questions, contact us at cs@zopec.com





ZOPEC EXPLORE™ MINI

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Merci de nous avoir fait confiance pour votre thérapie.
Notre batterie vous protège!

IMPORTANT!

Avant la première utilisation -
Chargez complètement la batterie Zopec
Mise en garde! Charger complètement avant le stockage et tous
les 6 mois. Echouer annulera la garantie!

SCANNEZ ICI
POUR COMMENCER



En utilisant
l'appareil photo
de votre
smartphone

Conseils rapides :

Allumer la batterie : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes jusqu'à ce que les voyants LED s'allument.

Chargement de votre Explore Mini : Utilisez votre propre fiche USB-C ou adaptateur d'alimentation CPAP pour charger.

Alimenter vos appareils électroniques : Selon l'appareil, branchez un câble USB ou USB-C sur le port approprié et chargez. Si vous utilisez un appareil CPAP, sélectionnez le câble DC pour votre appareil et connectez-le à la sortie DC sur la batterie.

Vous pouvez maintenant dormir en toute sécurité et sans interruption.

Pour toute question, contactez-nous à cs@zopec.com

